

BRUGERMANUAL
VELA LATIN 100/200

1.0 INDLEDNING

Kære Kunde

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Latin 100/200. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugervejledningen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Latin 100/200.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: www.vela.eu

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELAs distributør i dit land.

Du kan ligeledes finde information om VELA Latin på VELAs website: www.vela.eu

1.1 SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler.

Stolen er produceret af **VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.**

Formålet med VELA Latin 100/200 er en indendørs stol til siddende personer.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

1.2 REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret jf. købeloven. Dette gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker. VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

1.3 UDPAKNING AF STOLEN

VELA Latin leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

- VELA Latin 100/200 monteret med evt. ekstra tilbehør
- Denne brugermanual

1.4 VEDLIGEHOLDELSE AF VELA Latin

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Latin for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

Hjul


Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

Stel

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Polster


Betrækket er lavet af polyester, som blot skal vedligeholdes med støvsugning og en hårdt opvredet klud i vand. Evt. indkøbt inconti- betræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

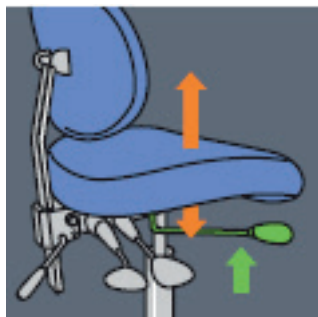

Højderegulering



Rygvinkling

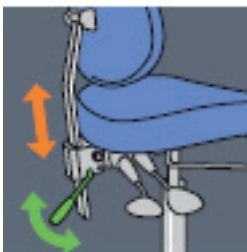

Ryghøjde



Sædekip

1.5 BRUGERMANUAL VELA Latin 100/200

Højderegulering af sædet

Højden på VELA Latin justeres ved at trække på højdereguleringshåndtaget, som er placeret i højre side.

Udskiftning af gasfjederen må kun ske af en tekniker fra VELA eller af en uddannet person indenfor dette felt.

Rygvinkling

Ryggen kan vinkles ved at trække i håndtaget, der sidder bagerst til højre. Husk at spænde den godt igen.

VELA Latin 200 leveres med ryg-rigle, og den låses i den ønskede vinkel ved at stramme håndtaget bagpå ryggen.

Ryghøjde

Ryghøjden justeres ved at løsne håndskruen til højre på rygbøjlen. Efter indstilling af ryghøjden skal håndskruen strammes til for at hindre beskadigelse af sædemekanismen,

Sædekip

Sædekip justeres ved at trække i det midterste håndtag på højre side.



Armlænsbredde og armlæns højde

Armlæn er ekstraudstyr.

Armlænsbredden reguleres nedenunder sædet vha. en umbraco nøgle. Husk at efterspænde.

Armlæns højden reguleres ved at trykke på knappen armlænet.

Tilbehør: Armlæn

1.6 TEKNISKE DATA

	VELA Latin 100	VELA Latin 200
Højderegulering	Gas, 350N	Gas, 500N
Sæde (D x B)	44 x 44 cm	47 x 49 cm
Sædevinkling	-6° - +6°	-6° - +6°
Sædedybde	37 - 44 cm	37 - 44 cm
Ryg (H x B)	37 x 30 cm	43 x 45 cm
Rygvinkling	-10° - +13°	-10° - +13°
Nakkestøtte	-	-
Siddehøjde	39-54 cm 44-64 cm 50-70 cm 60-86 cm	39-54 cm 44-64 cm 50-70 cm 60-86 cm
5-fods aluminiums stel	Sort/blank	Sort/blank
Kapacitet	125 kg	125 kg
Hmi-nr	31930	

