



BRUGERMANUAL

 *Tango™*
400



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. SIKKERHED	4
1.2. REKLAMATIONSRET	4
1.3. UDPAKNING AF STOLEN	4
1.4. VEDLIGEHOLD AF VELA TANGO 400	4
1.5. GENERELLE RETNINGSLINJER	5
1.5.1. Transport	5
1.5.2. Stabilitet og balance	5
1.5.3. Genbrug	5
1.6. VELA TANGO 400 BRUGERMANUAL	6
1.7. TEKNISK DATA	8

1.0. INDLEDNING

Kære Kunde

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Tango 400. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugermanualen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Tango 400.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: www.vela.eu

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELA.

Du kan ligeledes finde information om VELA Tango 400 på VELAs website: www.vela.eu

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

1.1. SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler. Stolen er produceret af VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV. Formålet med VELA Tango er en stol til siddende handicappede.

REKLAMATIONSRET

VELA henholder sig til købeloven mht. reklamationsret. Den gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker. VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

UDPAKNING AF STOLEN

VELA Tango leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

- VELA Tango 400 monteret med evt. ekstra tilbehør
- Denne brugermanual

VEDLIGEHOLDELSE AF VELA Tango 400

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Tango 400 for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

Stel

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Polster

Betrækket er lavet af 100% Trevira CS fra Kvadrat. Har du en VELA Tango 400 ErgnomiPlus model, så er midten af i sæde og ryg polstret emd 100% polyester fra Gabriel.

Det skal blot vedligeholdes med støvsugning og en hårdt opvredet klud i vand. Sørg for at fjerne evt. pletter hurtigst muligt.

Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud med lidt vand. Kan pletten ikke komme af, så forsøg med noget mild opvaskemiddel.

Hvis pletten er tørret ind børstes først overskydende af det spildte væk med hånden eller en børste. Dernæst støvsuges pletten. Herefter rengøres pletten med varmt vand, evt efterfølgende sæbevand. Det er vigtigt at efterrengøre med rent vand.

Behandling af vanskelige pletter

Pletfjerningsmidler skal "arbejdes ind i stoffet" med en ren, fugtig og absorberende klud.

ADVARSEL!

Vær forsigtig med brug af opløsningsmidler idet disse kan opløse underliggende polstermaterialer.

Disse råd er alene anbefalinger og kan ikke garantere at pletter fjernes 100%. Vi anbefaler i alle tilfælde at tage kontakt til et professionelt renseri, især ved større pletter og / eller grundig rengøring.

Evt. indkøbt incontibetræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

1.5. GENERELLE RETNINGSLINJER

For rigtig brug af VELA Tango bør man overholde følgende:

1.5.1. TRANSPORT

Ved transport af VELA Tango bør man altid huske at låse stolen. Der må ikke sidde personer i stolen under transport.

Temperatur under transport: minus 40 grader til plus 70 grader

Fugtighed: fra 15% - 95%

Lufttryk: ppp til 1000 meter over sø niveau

1.5.2. STABILITET OG BALANCE

VELA Tango er designet som en hverdagsstol til brug i skolen eller i hjemmet. Den er beregnet til stillesiddende arbejde. Alle bevægelser i VELA Tango har indvirkning på placeringen af tyngdepunktet. For at øge sikkerheden anbefales:

- Maksimal brugervægt er 155 kg, dog er aktivitetsniveauet en væsentlig faktor. En person med vældig kraftige bevægelser i stolen bør kontakte en salgskonsulent før køb
- Man må ikke stå i stolen
- Ved forflytning bør stolen altid låses



◀ HØJDEREGULERING AF SÆDET

Højden på VELA Tango 400 justeres ved at trække opad i multi-dynamic håndtaget, som er placeret nedenunder armlænet i højre side.

Udskiftning af gasfjederen må kun ske af en tekniker fra VELA eller af en uddannet person indenfor dette felt.



◀ MULTI-DYNAMIC™ SÆDE OG RYG

Sæde og ryg kan ved at trække ud i multi-dynamic håndtaget bevæge sig synkront. Hvis man ønsker at låse stolen i en bestemt position, gøres dette ved at skubbe håndtaget ind.



Føles multi-dynamicfunktion for let, eller for stram, så findes der en håndskrue nedenunder sædet, som kan justere multi-dynamicfunktionens fjeder.


SÆDEVINKLING

Sædevinklen justeres ved at trække ud i multi-dynamic-håndtaget, og derved kippe sædet i den ønskede vinkel. Når den ønskede vinkel er opnået, låses denne ved at skubbe håndtaget på plads.



◀ SÆDEDYBDE

Sædedybden flyttes ved at trykke på sædedybde knappen nedenunder sædet. Når man trykker på den reguleres sædedybden i flere intervaller ved at man skubber sædet enten fremad eller bagud.

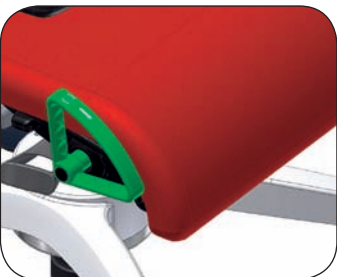

◀ BREMSEFUNKTION

Ved at skubbe håndtaget i højre side fremaf i pilens retning låses stolens fire hjul.



◀ ROTATION


Ved at skubbe håndtaget i venstre side fremad i pilens retning, kan sædet rotere 90 grader til højre eller venstre.



◀ ARMLÆNSBREDDE OG ARMLÆNSHØJDE

Armlænsbredden justeres ved at løsne håndskruen under sædet (bagved armlænsstangen). Husk at spænde den fast igen, når den har nået den ønskede bredde.

Armlæns højden justeres ved at løsne håndskruen på armlænsstangen, hvorefter du kan justere armlænet til den ønskede højde. Husk at spænde den igen.

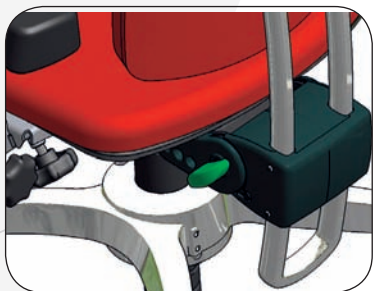

◀ RYGVINKLING

Ryggen kan vinkles ved at skrue på håndskruen til venstre på rygbøjlen.



◀ RYGHØJDE

Ryghøjden justeres ved at løsne håndskruen til højre på rygbøjlen.



TILBEHØR

◀ OPFOLDBAR FODRING

Fodringen bruges ved at skubbe til den med foden, så den enten svinges op eller ned.

VIGTIGT: Fodringen må ikke bruges til at træde på ved ind- og udstigning, da stolen kan vælte.

1.7. TEKNISK DATA

Testet og Godkendt af SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinsitut.



	VELA Tango 400
Højdejustering vha.	Gas 350N
Sæde	48 x 45 cm
Sædevinkling	-7°/+5°
Sædedybde	34 cm - 48 cm
Ryg	38 cm x 35 cm (standard) 50 cm x 38 cm
Nakkestøtte	28 cm x 16 cm
Rygvinkling	-7° / +8°
Armlænspudd	8 cm x 26 cm
Armlænsøjde	0-25 cm
Afstand mellem armlæn	46-58 cm
Siddeøjde	40-55 cm 43-58 cm 45-60 cm 48-63 cm
Understel	56 cm x 56 cm
Vægt	27 kg
Kapacitet	155 kg
Hmi nr.	45480