

BRUGERMANUAL



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. SIKKERHED	3
1.2. REKLAMATIONSRET	4
1.3. UDPAKNING AF STOLEN	4
1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TWIST	4
1.5. GENERELLE RETNINGSLINJER	5
1.6. VELA TWIST BRUGERMANUAL	7
1.7. TEKNISK DATA	8



PÅSÆTNING AF RYGLÆN

Håndtag til indstilling af ryglæn (1) sættes i åben position.

Knopfjeder (2) trykkes ind og ryglænsstang sættes ned igennem hul. Stram håndtag bagefter.

Bemærk: Ryglænsstang skal føres igennem hul så knopfjeder låser. Kontrollér at ryglæn ikke kan trækkes op igen!

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Twist 100EF. Vi er sikker på at den bliver til daglig glæde for dig. Brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligehold, tekniske data med mere.

VIGTIG!

Venligst læs denne brugermanual grundig og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual bør altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs hjemmeside: www.vela.eu

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELA.

Du kan også finde information om VELA Twist på VELAs hjemmeside: www.vela.eu

VELA forbeholder sig retten til ændringer.

VELA / Vermund Larsen A/S

Gøteborgvej 12
DK-9200 Aalborg
Danmark
www.vela.eu

1.1. SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler. Stolen er produceret af Sowecare i Holland og distribueret af VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark. Formålet med VELA Twist er en stol til siddende ældre og lettere handikappede.

Vigtig information

Apparatet overholder EMC-kravene i henhold til IEC 60601-1-2.

Radiosendingsudstyr, mobiltelefoner osv. skal ikke bruges i nærheden af apparatet siden det kan påvirke apparatets funktion. Der må udvises speciel forsigtighed under brug af stærkt forstyrrende kilder som højfrekvent kirurgisk udstyr o.l., så at HF-kablene ikke lægges i nærheden af apparatet. Hvis du er i tvivl, må du kontakte en tekniker fra VELA.

OBS: Vi anbefaler at brugere af eventuelle seler skal være under opsyn når selen anvendes.

FØR BRUG

Når stolen leveres skal den tilpasses til brugeren. Det er vigtigt at alle nedenstående punkter bliver tilpasset og undersøgt:

- Oplad batteriet - det er ikke nødvendigvis helt fyldt
- Tilpas bredden og højden på armlænene
- Tilpas sædet
- Tjek at bremserne virker - samt alle andre indstillige dele er strammet og ikke transportskadet.
- Tjek kablerne for evt. fejl
- Husk at låse hjulene, såfremt du bruger højdejusteringen og kommer højere op end du kan nå jorden med fødderne.

1.2. REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret jf. købeloven. Reklamationsretten gælder kun ved brug af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af en autoriseret servicetekniker.

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren som har opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slidtage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

Ved henvendelse om tilbehør e.l kan denne stol identificeres ud fra produktspecifikationen som findes under sædet.

1.3. UDPAKNING AF STOLEN

VELA Twist leveres i miljø- og brugervenlig papemballage. Hvis der er fejl, mangler eller transportskade på produktet skal leverandøren kontaktes. Du må ikke forsøge at reparere evt. skader selv eller tag stolen i brug.

Den kasse stolen leveres i indeholder:

- 1 stol påmonteret evt. ekstra tilbehør
- 1 brugermanual (denne)

1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TWIST

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Twist for at finde f.eks. defekte og slidte dele. Man bør selv efterjustere de aftagelige dele regelmæssigt.

HJUL

Det anbefales at undersøge hjul og rense dem for eventuelle trådrester etc. med jævne mellemrum.

STEL

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

SØJLE

Hvis stolen, efter nogle års brug, føles lidt træg i højdereguleringen, vil en smøring af søjlen med syrefri olie være fordelagtig. Udskiftning af aktuør udføres af leverandøren, eller af en fagkyndig person.

POLSTRET

Pletter fjernes ved brug af vand og vaskemiddel. Evt. indkøbt inconti-betræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

1.5. GENERELLE RETNINGSLINJER

For rigtig brug af VELA Twist bør man overholde følgende:

TRANSPORT

Ved transport af VELA Twist bør man altid huske at låse stolen. Der må ikke sidde personer i stolen under transporten.

Temperatur under transport: minus 40 grader til plus 70 grader

Fugtighed: fra 15% - 95%

Lufttryk: ppp til 1000 meter over sø niveau

STABILITET OG BALANCE

VELA Twist er designet som en hverdagsstol til brug i hjemmet eller på arbejdspladsen. Den er beregnet til stillesiddende arbejde. Alle bevægelser i VELA Twist har indvirkning på placeringen af tyngdepunktet. For at øge sikkerheden anbefaler vi:

- Maksimal brugervægt er 125 kg, dog er aktivitetsniveauet en væsentlig faktor. En person med kraftige bevægelser i stolen bør kontakte en salgskonsulent før køb.
- Man må ikke stå i stolen.
- Man skal sætte sig almindeligt i stolen - ej smide sig hårdt
- Ved forflytning bør stolen altid låses.

LADNING

Daglig ladning anbefales. Placer stikket i ladekontakten. Laderen kan godt stå tilkoblet til næste gang stolen skal benyttes.

ADVARSEL: Stolen må ikke benyttes under ladning.

Batteriet skal oplades mindst to gange ugentlig, også selvom batteriet ikke er helt tomt; det er bedre for holdbarheden af batteriet.

BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges, f.eks. plastik, metal, elektrisk og elektronisk udstyr mv. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Bemærk! Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier er mærket med nederstående ikon. Dette kendetegner udstyr som indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt, og derfor skal indsamles særskilt.



Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

1.6. VELA TWIST BRUGERMANUAL

◀ SIDDEHØJDE

Højden på VELA Twist justeres ved hjælp af el. Dette gør man ved at trykke på knappen under armlænet i enten højre eller venstre side.

Højdefunktionen må max. bruges 10% af tiden. Dvs. i 1 minutters kontinuerligt brug, derefter 9 minutters pause, eller 2 minutters kontinuerligt brug og 18 min. pause.

◀ SÆDE & RYG VINKLING

Sædet og ryggen vinkles sammen vha. håndgrebet, som er placeret under armlænet på højre side.

◀ RYGVINKLING

Ryggen vinkles med håndgrebet som er placeret bagerst på højre side.

◀ RYGHØJDE

Ryghøjden reguleres med håndtaget som er placeret bag på ryggen på højre side. Husk at stramme den godt igen ellers kan den glide ned.

◀ ARMLÆN OPKLAPPELIGT

Armlænet kan opklappes for nem forflytning.



◀ BREMSER

VELA Twist bremses ved at presse det røde håndgreb ned på begge store hjul. Det er vigtigt at låse på begge hjul. For at låse hjulene op, føres det røde håndgreb op.



Når stolen er låst er håndtaget rødt som vist på det øverste foto, og når stolen er ulåst ses et grønt markat på håndtaget.




◀ RYG-RIGLEN

Ryglænet på VELA Twist kan låses i den ønskede vinkel ved at stramme rygriglen bagpå ryggen

1.7. TEKNISK DATA

KONSTRUKTION:

- Understel i lakeret aluminium
- Højderregulering med hævsænk el.motor
- Manuel sæderegulering
- Strømkreds 24VDC med integreret motor kontrol
- Batterier: Power Pack 1180 mA Lithium-Ion batteri
- Lader: OKIN lader PRI: 230V ~ 50Hz 26W SEC: 24V ~ 830mA 20VA
- Ej anvendes i ESD områder 

VELA Twist 100EF	
Højderegulering, vh	El-regulering monteret på højre eller venstre armlæn
Sæde, Y	44 x 44 cm
Sædevinkling	-5° / +3°
Sædedybde	37-44 cm
Ryg, CY	43 x 45 cm
Rygvinkling	25° (-82° - 107°)
Armlænsstr	6 x 35 cm
Armlæns højde (opklappelig)	15-27 cm
Armlæn, længdejustering	5 cm
Afstand mellem armlænene	33 - 43 cm
Sidde højde	44 cm - 78 cm
Understel	50 x 71 cm
Total længde	72 cm
Total bredde	64 cm
Vægt	34 kg
Kapacitet	125 kg

