





Fodring/ Fotring/ Fotring/ Foot ring - VELA Samba

Montering af fodring Ø45 cm

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)900570 Fodring justerbar Ø45 cm

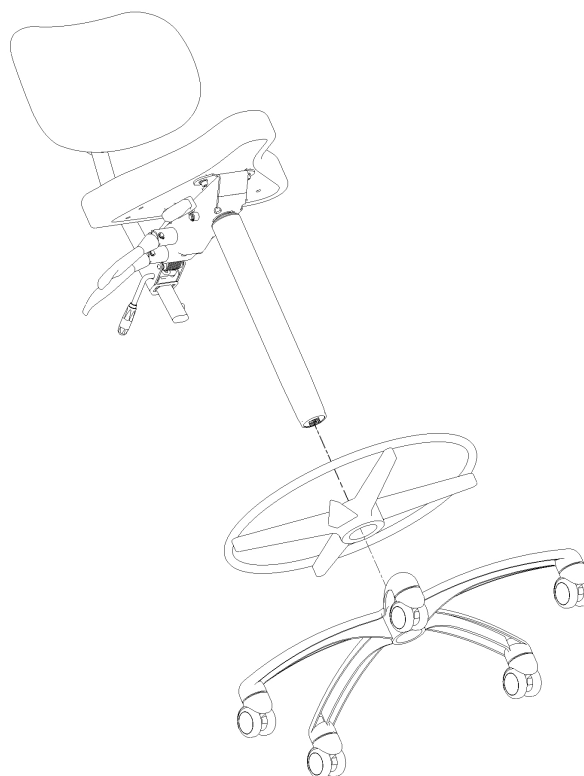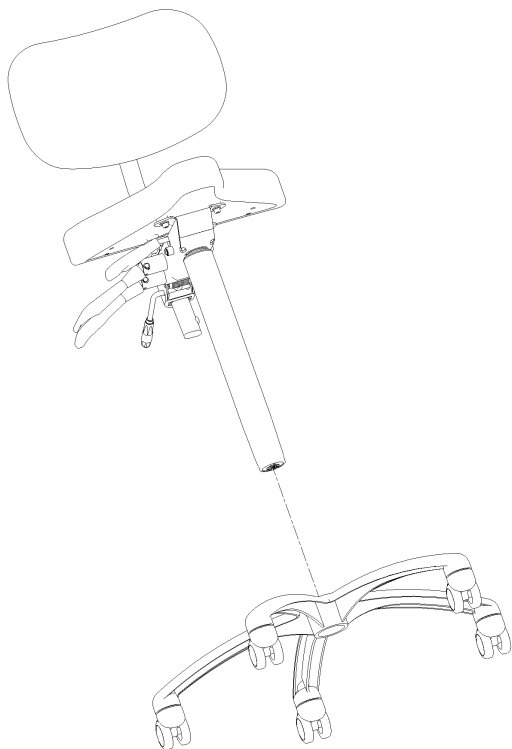

DANSK

1. Slå understellet af med en gummihammer.
2. Placer fodringen på gaspatronen.
3. Monter understellet igen og rejs stolen op.
4. Placer fodringen i den ønskede højde og stram håndskrue på fodringen.

NORSK

1. Slå av understellet med en gummihammer.
2. Plasser fotringen på gasspatronen.
3. Monter understellet igjen, og reis opp stolen.
4. Plasser fotringen i ønsket høyde, og stram håndskruen på fotringen.

SVENSKA

1. Knacka loss underredet medgummihammare.
2. Placera fotringen på gaspatronen.
3. Montera underredet igen och ställ upp stolen.
4. Placera fotringen på önskad höjd och dra åt vredet på fotringen.

ENGLISH

1. Remove the underframe by hitting it with a rubber mallet.
2. Place the foot ring on the gas cartridge.
3. Mount the underframe once again and set the chair upright.
4. Set the foot ring to the desired height and tighten the hand screw on the foot ring.