



Pelvi sele/ Hoftesele/ Pelvi sele/ Pelvi lap belt - VELA Tango

Montering af Pelvi sele, VELA Tango serien

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:




(A)926658 Pelvi sele, 2-punkt small

(A)926659 Pelvi sele, 2-punkt medium

(A)926660 Pelvi sele, 2-punkt large

Kit:

(A)101030 Monteringskit for Pelvi sele

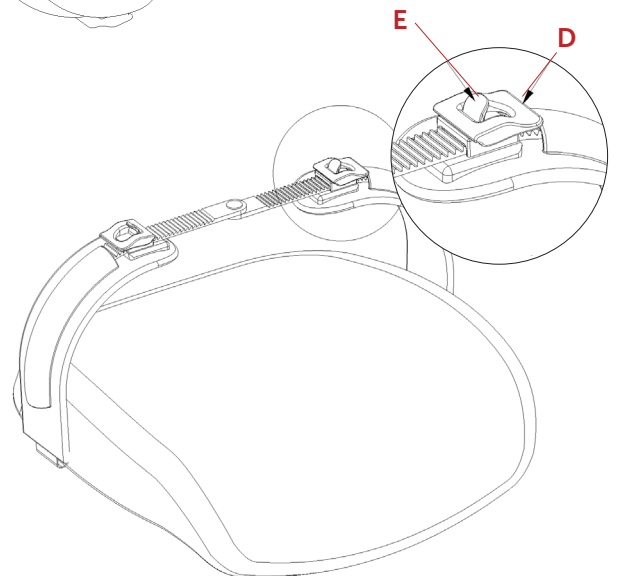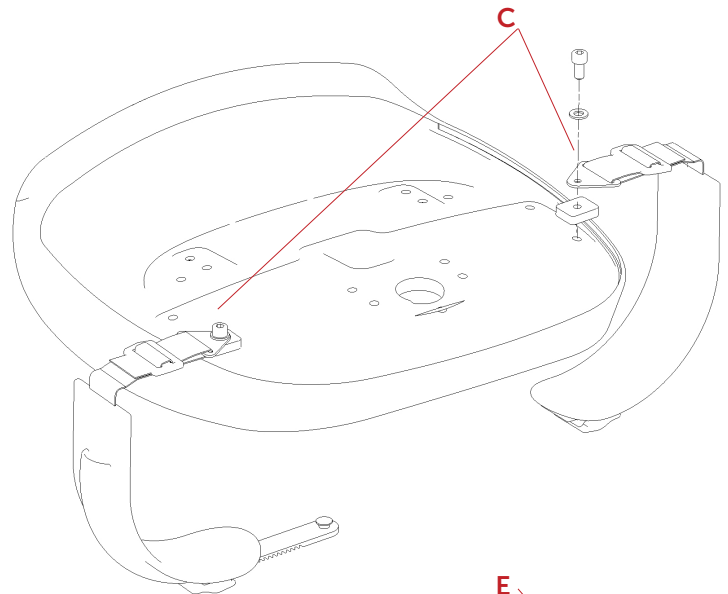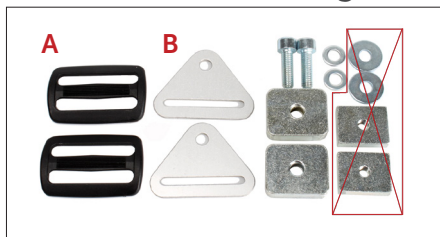

DANSK

1. Monter selen fast i det viste hul (C) i hver side med afstandstykke, skrue og skive.
2. Juster selebåndet til korrekt længde.
3. Selen strammes ved at vippe plastbeslaget (D) opad ind mod midten.
4. Tryk på den lille tap (E) på beslaget, for at løsne selen.

NORSK

1. Monter selen fast i det angitte hullet (C) på hver side med avstandsstykke, skrue og skive.
2. Juster selebåndet til riktig lengde.
3. Selen strammes ved å vippe plastbeslaget (D) oppover og inn mot midten.
4. Trykk på den lille tappen (E) på beslaget for å løsne selen.

SVENSKA

1. Montera selen i hålen (C) på varje sida med distans, skruv och bricka.
2. Justera selen så att den blir lagom lång.
3. Selen dras åt genom att vippa plastbeslaget (D) uppåt, in mot mitten.
4. Tryck på den lilla fliken (E) på beslaget för att lossa selen.

ENGLISH

1. Mount the belt in the holes shown (C) on each side, with spacers, screws and discs.
2. Adjust the belt strap to the correct length.
3. Tighten the belt by pulling the plastic fixture (D) up and in towards the middle.
4. Press the small pin (E) on the fitting to loosen the belt.