


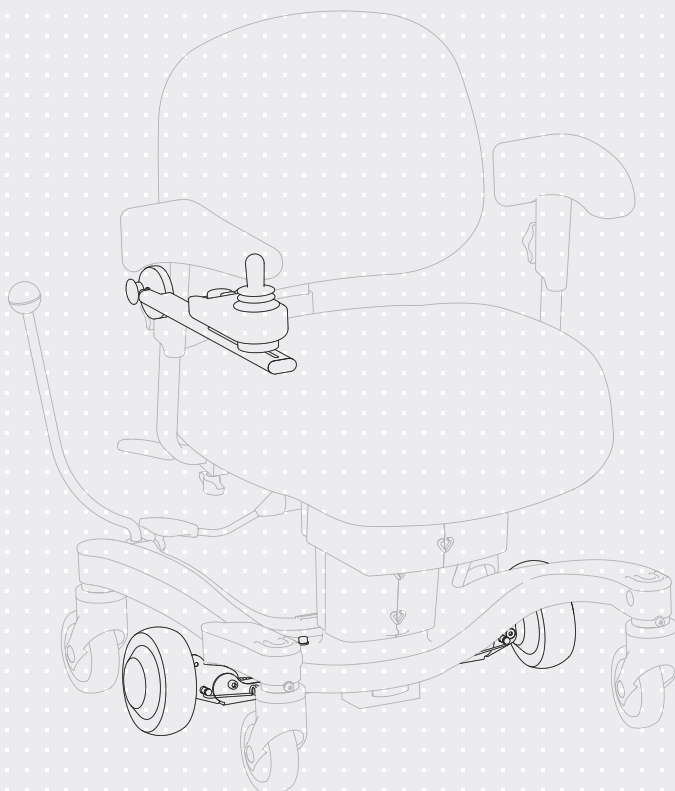

Elektrisk fremdrift

TIL: 700E

Manual. nr. 105758



ISO 9001
ISO 14001

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. ADVARSLER	4
1.2. FEJLFINDING	5
1.3. BRUGSANVISNING	6
1.3.1. Tænd/sluk for drivesystemet	6
1.3.2. Styring	6
1.3.3. Hastighedsstyring	6
1.3.4. Nedklappeligt joystick	6
1.3.5. Højdebegrænsning	7
1.3.6. Batteriindikator	7
1.3.7. Fold-op-hjul	7
1.3.8. Bremsning	7

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Tillykke med dit nye fremdrifttilbehør fra VELA.

Dette produkt er ikke i sig selv et medicinsk apparat, men et tilbehør til VELA Tango 700E-stolen. Se venligst brugermanualen til VELA Tango 700E for tiltænkt brug og anden information.

Dette dokument tjener som et supplement til brugermanualen, der følger med VELA Tango 700E-stolen.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen. Brugermanualen kan også findes på www.vela.dk, hvor du også kan finde anden relevant information om vores stole.

Har du spørgsmål, oplever fejl eller utilsigtede hændelser, kontakt da din VELA-leverandør.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela.dk

1.1. ADVARSLER



Elektrisk fremdrift giver assistance til stolens mobilitet, mens du stadig kan bruge dine ben til mobilitet. Det er ikke meningen, at det skal bruges som en kørestol. Når det er monteret, er stolen mere retningsstabil og kan derfor ikke bevæge sig direkte sidelæns.

Brug	Brug ikke drivsystemet, mens bremsen er aktiveret.
Brug	Brug ikke drivsystemet, når dækhjulene ikke er i kontakt med gulvet.
Brug	Brug ikke drivsystemet, når du ikke sidder i stolen.
Brug	Kør ikke, mens stolen står til opladning.
Brug	Må kun monteres af kvalificeret personale.
Brug	Vær opmærksom på dine omgivelser.
Brug	Kør ikke udenfor eller på skrå/ujævne flader.
Brug	Overdreven brug kan dræne batteriet hurtigere end normalt. Husk at oplade hyppigt.
Brug	Dette tilbehør fungerer ikke sammen med dobbelthjul eller firehjulsbremse.
Brug	Træd ikke på motorstyringen, som befinder sig nederst på stolestellet mellem baghjulene.


1.2. FEJLFINDING

Monteringsvejledning 106234 kan findes på VELAs hjemmeside: www.vela.dk

Fejl	Årsag	Løsning
Fejlkode C1 vises på displayet	Højdejusteringen er indstillet for højt. Mekanismen til højdebegrænsning er defekt.	Sænk sædehøjden Gennemgå monteringsvejledningen, trin 3, nr. 14 igen.
Fejlkode R6 vises på displayet	Lavt batteri.	Oplad stolen
Utilstrækkelig moment	Joysticket var ikke i neutral, da drivesystemet blev tændt.	Løsn joysticket og genstart drivesystemet
Høj modstand ved at trampe med fødderne	Tykke eller løse tæpper, bløde gulvbelægninger. Skrå overflade. Lavt batteri. Høj rullemodstand. Fartregulatoren er skruet ned.	Undgå disse typer gulvbelægninger Kør ikke på skråninger Oplad stolen Hjælp med dine fødder Skru op for hastigheden. Se 1.3.3.
High resistance when paddling with your feet	Drivesystemet er tændt.	Sluk for drivesystemet


Løser ovenstående ikke dit problem, kontakt da din VELA-leverandør.

1.3. BRUGSANVISNING

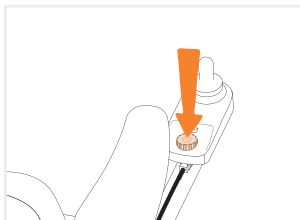


1.3.1. TÆND/SLUK FOR DRIVESYSTEMET

Tænd drivesystemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen på joysticket. Sluk det ved at trykke på knappen igen. Drivesystemet slukker automatisk efter 5 minutters inaktivitet.

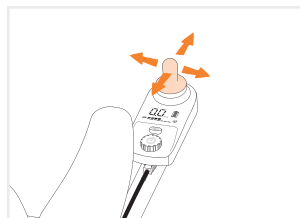


1.3.2. STYRING

Brug joysticket til at styre retning og hastighed. Bemærk, der er en blid acceleration og deceleration for at sikre en jævn kørsel. Du kan køre ved at bruge drivesystemet eller kombinere det med at bruge dine fødder som hjælp.

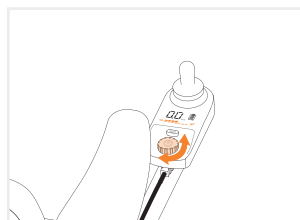


1.3.3. HASTIGHEDSSTYRING

Drej tænd/sluk-knappen til en af siderne for at justere den maksimale hastighed. Skalaen går fra fuld til halv hastighed. Bemærk at omdrejningsmomentet er knyttet til hastigheden, så jo højere hastighed, desto lettere kan du komme fremad.

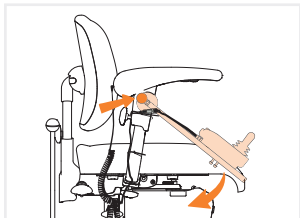

1.3.4. NEDKLAPPELIGT JOYSTICK

For at kunne komme tættere på dit bord eller bare være af vejen, når det ikke er i brug, kan du folde kontrolleren ned. Tryk på den orange knap, og tyngdekraften får joysticket til at falde ned. For at få det tilbage på plads skal du blot løfte joysticket op igen. Bemærk, at du ikke kan trykke på knappen, når der lægges vægt på joysticket.

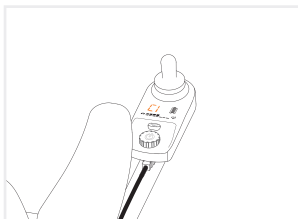


1.3.5. HØJDEBEGRÆNSNING

Af sikkerhedsmæssige årsager kan stolen ikke køre, når højdeindstillingen er for høj. Joysticket afkobler automatisk strømmen til hjulene, hvis siddehøjden er for høj. Dette kan ses på joysticket, hvor den viser "C1" på displayet. Det genaktiveres automatisk, når højden igen sænkes til et sikkert niveau.




1.3.6. BATTERIINDIKATOR

På kontrolleren er der en batteriindikator, der er aktiv, når fremdriftssystemet er tændt. Højdejusteringen og fremdriftssystemet bruger det samme batteri, så stolen oplades som normalt. Bemærk, at indikatoren kan fejlvurdere batterikapaciteten ved overdreven brug. Daglig opladning anbefales for forbedret batterilevetid.

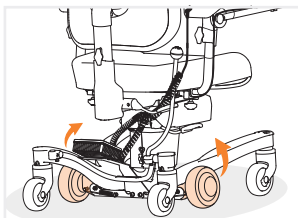

1.3.7. FOLD-OP-HJUL

Hjulene kan foldes op og muliggøre, at VELA-stolen fungerer fuldstændigt som før, uden fremdriftssystemet. Løft fremdriftshjulene manuelt, så de ikke længere har gulvkontakt. Så kan du igen bevæge stolen sidelæns. For at aktivere fremdriftshjulene, skal du blot trykke dem ned igen.

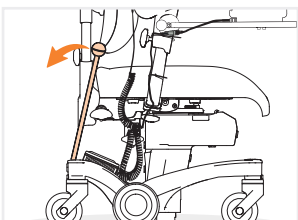

1.3.8. BREMSNING

Bremsen, som du kender fra din VELA-stol, er ikke forbundet med fremdriftssystemet. Du skal derfor huske at låse bremsen op, før du kører. Bemærk, at dette gælder både for manuelle og elektriske bremses.

